

## Perfil Allergix IgG4 90 Alimentos

**Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes da coleta.**

### Requerimento de Espécime

- Soro 3 – 9 ml (Por Instrução) **Congelar**

### Preparação do Paciente

- Não é necessário estar em jejum.
- O uso de drogas imunossupressoras, como a cortisona, pode atrapalhar o resultado do exame. Deixe de utilizar determinados medicamentos 60 dias antes do exame para que as reações dos anticorpos sejam visíveis.
- Não é necessário descontinuar o uso de suplementos alimentares ou hormonais. Anormalidades revelarão necessidades especiais que não são supridas pela dieta e suplementos que o paciente ingere.

### Kit de Materiais

- 2 tubos a vácuo de tampa amarela
- 1 tubo criogênico de tampa vermelha
- 1 Pipeta
- 2 Gelos para refrigeração

### Modo de Coleta do Soro

1. **Colete** o sangue nos tubos a vácuo de tampa amarela;
2. **Coagule** o sangue deixando o tubo em posição vertical em temperatura ambiente por 20 minutos;
3. **Centrifugue** os tubos a vácuo entre 10 e 15 minutos para evitar hemólise. O soro deverá estar livre de hemólises ou células vermelhas.
4. **Pipete** 4ml de soro nos tubos a vácuo e transfira para o tubo de tampa vermelha.
5. **Congele** o tubo com soro e congele os bags de gelo até o envio.