

POR FAVOR, LEIA AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DA COLETA

REQUERIMENTO DE ESPÉCIME

- Soro 3 - 9ml (Por Instrução) Congelar

PREPARAÇÃO DO PACIENTE

- Não é necessário estar em jejum.
- O uso de drogas imunossupressoras, como a cortisona, pode atrapalhar o resultado do exame. Deixe de utilizar determinados medicamentos 60 dias antes do exame para que as reações dos anticorpos sejam visíveis.
- Não é necessário descontinuar o uso de suplementos alimentares ou hormonais.
Anormalidades revelarão necessidades especiais que não são supridas pela dieta e suplementos que o paciente ingere.

KIT DE MATERIAIS

- 2 tubos a vácuo de tampa amarela
- 1 tubo criogênico marrom de tampa vermelha
- 1 pipeta
- 2 gelos para refrigeração
- 1 saquinho zip com etiqueta de identificação **(OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO COMPLETO DAS INFORMAÇÕES)**

MODO DE COLETA DO SORO

- 1. Colete** o sangue nos tubos a vácuo de tampa amarela;
- 2. Coagule** o sangue deixando o tubo em posição vertical em temperatura ambiente por 20 minutos;
- 3. Centrifugue** os tubos a vácuo entre 10 e 15 minutos para evitar hemólise. O soro deverá estar livre de hemólises ou células vermelhas.
- 4. Pipete** 4 ml de soro nos tubos a vácuo e transfira para o tubo de tampa vermelha.
- 5. Congele** o tubo com soro e congele os bags de gelo até o envio.